

動物病院用カメラを スマートフォンで見る

・アンドロイド端末で見る

動物病院用カメラをスマートフォンやタブレットで見る方法をご説明します。アプリケーションのインストールと設定方法は「IP CAM VIEWER のインストール編」をご覧ください。

IP CAM VIEWER 閲覧編

IP CAM VIEWER 起動

ip cam viewer のアイコンをタップして起動。



カメラの選択

登録されているカメラが表示されます。
見たいカメラを選択して下さい。



選択したカメラが映ります。



カメラを選択します。

他カメラへの切り替え


下段の一覧をタップすると他のカメラへ表示が切り替わります。



他のカメラへも簡単に切り替え。

画面にタッチしてカメラを左右に動かす

カメラの向きを変えたい方向にフリック（指で軽く画面をなでる）するとカメラの向きが変わります。

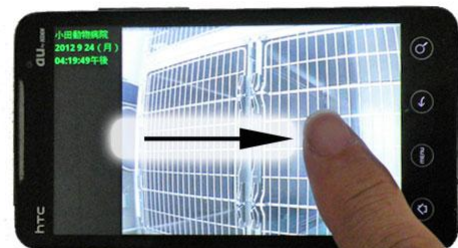


画面タッチでカメラを上下左右に。

画面にタッチして拡大・縮小

ピンチアウト（2本の指で開くような動作）すると拡大します。


ピンチイン（2本の指を狭めるような動作）すると縮小します。

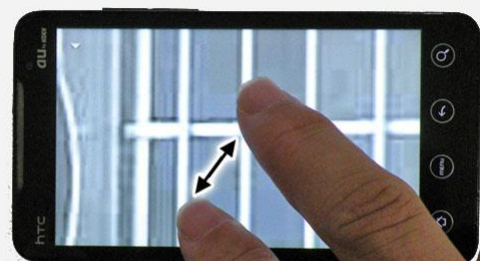

拡大縮小も簡単。

ボタン操作でカメラを動かす

上下左右ボタンをタップするとそれぞれの方向にカメラが向きます。

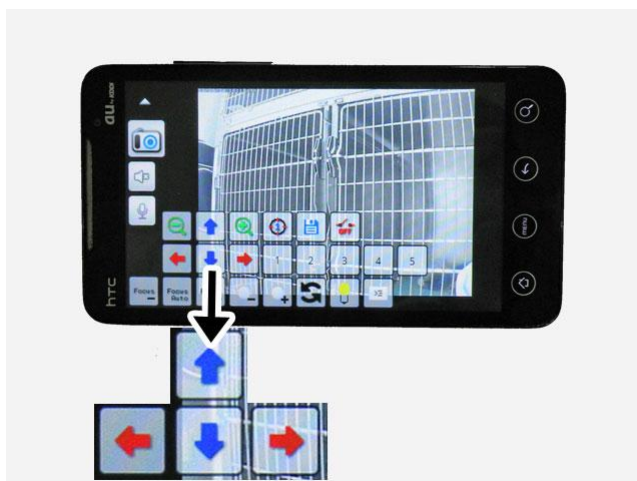

照明の点灯・消灯

on ボタンをタップすると照明が点灯し、off ボタンをタップすると消灯します。



ONとOFFが押すたびに切り替わります。

予め設定した場所にカメラを向ける

番号ボタンをタップすると予め設定していた向きにカメラが動きます。

1～5番まで位置を設定できます。



音を聞く

スピーカーボタンをタップすると、音が聞こえます。

動物の鳴き声など様子がわかります。



マイクで話す（オプション）

マイクボタンをタップするとこちらの声が向こうに聞え会話が可能です。

※オプションのスピーカーを取り付ける必要があります



静止画の記録

カメラボタンをタップすると静止画を保存することが出来ます。



株式会社ネットカメラ

〒718-0003 岡山県新見市高尾 2287

Tel.0867-78-1050 Fax.0867-78-1051

<http://net-camera.jp/>

e-mail: info@net-camera.jp

動画で見る

動画でもご覧いただけます。

<http://net-camera.jp/demo/index.html>

2015/05/18